



Corporación Panadent

580 S. Rancho Avenue • Colton, California 92324, USA

Tel: (909) 783-1841 • EEUU & Canadá (800) 368-9777

Instrucciones para Reemplazar el Gancho Central

Artículos necesarios para reemplazar el Gancho Central:

- 1 #2023 Gancho central
- 1 #9702 Resorte del gancho
- 1 #9906 Llave hexagonal o llave allen 1/16"
- 1 #9904 Llave hexagonal para Articulador o llave allen 3/32"

Remoción del Gancho Central

Aflojar los tornillos de los análogos azules para remover los pernos Dyna-Links de los Análogos. Liberar el Gancho Central y remover el bastidor superior del articulador del bastidor inferior. Sostener el articulador y usando la llave hexagonal del articulador, aflojar y remover el tornillo de la ranura central. Remover la ranura central de bronce. Usando una llave hexagonal de 1/16", aflojar tornillos de los pernos de la bisagra del Gancho Central. Empujar los pernos de la bisagra hacia fuera a través de la ranura central. Remover el gancho central. Nota: Tener cuidado de no perder el resorte del gancho central.

Colocación del Gancho Central

Colocar el gancho central nuevo en el bastidor inferior del articulador. Empujar los pernos de la bisagra en un lado hasta que comience a entrar en el Gancho Central. Colocar y empujar el resorte en su posición en el Gancho Central, después empujar el perno de la bisagra. Apretar los tornillos de los pernos de la bisagra del Gancho Central. Volver a colocar el bastidor superior del articulador y ajustar la Ranura Central según sea necesario.

