

## Instrucciones para Ajustar el Tornillo de la Platina de Montaje:

1. Remover el ensamblado con la perilla del tornillo de la platina de montaje.



2. Aflojar el tornillo opresor en la perilla del tornillo con una llave hexagonal.



3. Oprimir el eje del tornillo en la perilla del tornillo con un dedo.



4. Apretar el tornillo opresor en la perilla del tornillo con una llave hexagonal para asegurar el eje del tornillo. Colocar el ensamblado de la perilla del tornillo en el articulador.

