



# Panadent Instrucciones Articulador Plástico Ligero (PAL): ¡Creando una unión funcional entre articuladores desechables y semiajustables!

Corporación Panadent  
580 S. Rancho Avenue • Colton, California 92324, USA  
Tel: (909) 783-1841

- Eje de Rotación Anatómico (igual que el articulador regular)
- Guías Horizontales y Verticales
- Pedestal de Apoyo Incorporado

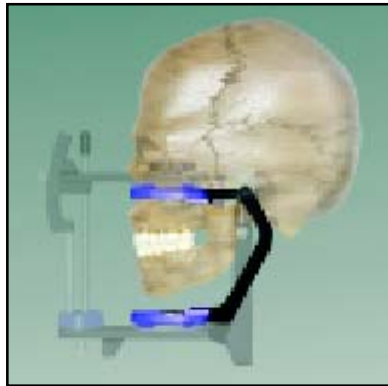

- Platina de Montaje con un Diseño Nuevo  
Un indicador para PAL...  
Otro para el Articulador
- Desechable o Reusable
- Abre a 100 para separar los bastidores

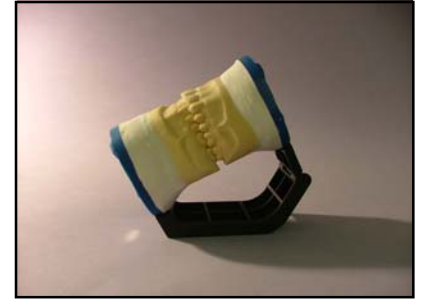

## Instrucciones:




1. Montar los moldes de estudio en la platina magnética de montaje del articulador Panadent regular (modelo PCH o PSH) usando el Analizador Dento-Facial Kois o el arco facial Pana-Mount y un registro interoclusal.



2. Remover los moldes de estudio unidos a las platinas de montaje del articulador Panadent regular. Enganchar el articulador Panadent PAL nuevo en el puerto localizado en la parte trasera de la platina de montaje magnética plástica.



3. Después de realizar los procedimientos de laboratorio para restauraciones, el articulador PAL puede separarse de los moldes presionando el botón de liberación localizada en la parte baja de la platina de montaje magnética plástica.

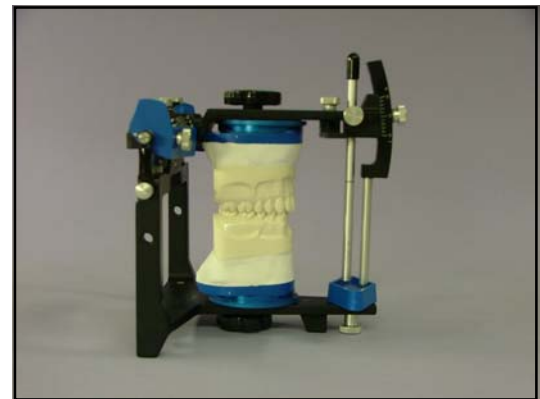

4. Los moldes se pueden colocar en el articulador Panadent regular para controlar la calidad de las restauraciones usando la guía de los análogos de movimiento curvilíneos y realizar ajustes finales requeridos.